

## Verarbeitungsanleitung für:

**prodental® Jewels / prodental® Diamonds / prodental® Twizzler**

## auf Keramikkronen

Reinigen Sie die Rückseite des Zahnschmucks mit 70% Alkohol.  
Es ist absolut notwendig, dass die Rückseite fett- und staubfrei ist.  
Ein mit Alkohol getränktes Wattepellet oder Microbrush eignet sich am Besten.

1. Die Oberfläche der Keramik mit einem Hartmetallinstrument oder einem keramisch gebundenen Stein vorsichtig anschleifen (aufrauen).

Die angeraute Fläche sollte etwas größer sein als der Zahnschmuck.

2. Haftvermittler (z.B. Keramikreparaturset) auf die vorbehandelte Fläche auftragen.

3. Tragen Sie ein **chemisch härtendes** Komposit auf die Fläche auf.  
Sie benötigen sehr wenig Komposit beim Aufkleben der **prodental® Jewels**  
**prodental® Diamonds**. Beim Aufkleben von **prodental® Twizzler** benötigen Sie  
etwas mehr Komposit, da die Rückseiten dieser Schmuckstücke  
dreidimensional sind.

4. Mit dem **Stick TW98** können Sie den Zahnschmuck gut aufnehmen  
und positionieren. Drücken Sie den Zahnschmuck fest auf das Komposit  
bis dieses ausgehärtet ist.

5. Übergänge wenn nötig polieren. Beste Resultate erzielen Sie mit dem Kenda  
Hybrid Polierer.