

**Verarbeitungsanleitung für:**  
**prodental® Jewels / prodental® Diamonds / prodental® Twizzler**  
**auf Kunststoffzähnen**

1. Die Rückseite des Zahnschmucks mit Alkohol entfetten.
2. Den Kunststoffzahn mit einer Fräse aufrauen, bzw. eine kleine Vertiefung an der gewünschten Stelle schaffen.
3. Dann ein lichthärtendes Bonding verwenden (z.B. Heliobond oder Stae).
4. Anschließend mit fließfähigem Komposit (z.B. Tetric flow oder Wave) die prodental®**Jewels** / prodental®**Diamonds** / prodental®**Twizzler** befestigen.